

Ice Pack 100g



Cena: 5,40 zł

Opis słownikowy

Dostępność dostępny

Opis produktu

Ice pack 100g

Suchy lód, kompres jednorazowy 100 g

Ice Pack, suchy lód w postaci kompresu w woreczku włókninowym wykorzystywany jest w celu zmniejszenia bólu i opuchlizny spowodowanej kontuzją m.in skręceniem stawów lub stłuczeniem mięśni.

Zaletą produktu jest niewielki rozmiar opakowania oraz niska waga. Pozwala to na przechowywanie kompresu w niemal każdej kieszeni plecaka, bez odczuwalnego obciążenia.

Aktywacja następuje przez ucisk opakowania, co umożliwi szybkie osiągnięcie temperatury około 4°C.

Produkt nie wymaga wcześniejszego chłodzenia w zamrażarce. Czas działania wynosi od 20 do 40 minut.

Sposób użycia:

- Chwyć torebkę za jeden ze zgrzewów i wstrząśnij nią.
- Naciśnij środkową część torebki obiema rękami, aż pęknie wewnętrzna bańka.
- Potrząśnij, aby wymieszać zawartość.
- Uzyskaną torebkę chłodzącą wykorzystaj do schłodzenia odpowiedniej części ciała.

Efektywny czas działania torebki wynosi 20-40 minut. Należy unikać nadmiernego schłodzenia ciała objawiającego się zasinieniem skóry i/lub pieczeniem w miejscu schłodzenia.

Galeria

