

Opatrunek indywidualny Olaes Modular 4" FLAT



Cena: 42,12 PLN

Opis słownikowy

Dostępność	chwilowo niedostępny
Producent	Tac Med Solutions

Opis produktu

Opatrunek indywidualny Olaes Modular Bandage 4"

"Mniejsza" wersja opatrunku Olaes - bandaż 10cm, pakowana "na płasko"
Różnicę w pakowaniu widać na pierwszym zdjęciach w galerii

Opatrunek OLAES został zaprojektowany w odpowiedzi na trudne warunki pola walki, na bazie doświadczeń jednostek specjalnych w Iraku i Afganistanie.

OLAES jest umieszczony w sterylnym, hermetycznym opakowaniu, wewnątrz którego znajduje się próżnia. Powoduje to zmniejszenie rozmiarów opatrunku, który dzięki temu można przymocować do kamizelki taktycznej, hełmu lub włożyć do plecaka.

OLAES jest rozwiązaniem typu wszystko w jednym tzn. można użyć go w przypadku różnych typów zranień.

Może być stosowany zarówno przez ratownika medycznego, jak i żołnierza przeszkolonego w zakresie pierwszej pomocy.

OLAES pozwala ratownikowi wyjąć z kompresu wyjąłowaną gazę o gęstej, nieregularnej strukturze i za jej pośrednictwem uzyskać ucisk dokładnie w miejscu, gdzie jest to potrzebne.

Za jej pomocą można usunąć ciała obce z rany i okolic. Następnie gazę można owinąć kompresem nieprzywierającym do rany i ścisnąć bandażem elastycznym w celu ochrony rany przed zanieczyszczeniem i uzyskania precyzyjnego bezpośredniego ucisku.

Gazę można zastosować do jednoczesnego zaopatrzenia tym samym opatrunkiem zarówno rany wlotowej, jak i wylotowej (wg nowych wytycznych rany postrzałowe powinny być zapakowane gazą, czyli do kanału powinna zostać wciśnięta gaza, aby ucisnąć krwawiące naczynie krwionośne).

Bandaż elastyczny posiada rozmieszczone poprzecznie cienkie taśmy typu rzep uniemożliwiające przypadkowe rozwinięcie się bandaża w czasie jego stosowania.

Ta funkcja również ogranicza możliwość zanieczyszczenia opatrunku, szczególnie gdy ranny znajduje się w takim środowisku, jak pustynia czy lasy tropikalne.

Nie ma możliwości, by rolka bandaża rozwinęła się sama, co może się zdarzyć w sytuacji, gdy ratownik jest w stanie silnego stresu. Taśmy stabilizują również opatrunek po końcowym jego zamocowaniu.

Wewnątrz opatrunku OLAES znajduje się plastikowa folia, która służy jako opatrunek okluzyjny na rany postrzałowe klatki piersiowej oraz jako izolacja termiczna.

Specyfikacja:

- bandaż elastyczny: szerokość 10cm, długość 120cm
- kompres na ranę: 10x15cm
- gaza rolowana o szerokości 9cm i długości ok.250cm
- folia uszczelniająca rany klp: 5x7cm
- orientacyjne wymiary zapakowanego próżniowo opatrunku: 13x10cm, grubość około 3cm.

Numer NSN 6510-01-558-3342

Instrukcja użycia opatrunków OLAES

Recenzja opatrunku Olaes na blogu kryzysowo.pl

Galeria



Olaes Modular Bandage - 4
Полнофункциональный универсальный (НБИ) МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ



Использование

Вариант 1

- 1) Приложите к ране марлевую подушечку гемостатическим (завязкой) колпачком вверх. Край колпачка должен максимально точно соответствовать плоскости открытой раны.
- 2) Плотно зафиксируйте повязку эластичным бинтом.
- 3) Загерметизируйте края с помощью скотча.

Вариант 2

- 1) Откройте боковой клапан марлевой подушечки. Извлеките из упаковки бинт и свой колпачок из полимеризованного материала.
- 2) Приложите бинт и свой герметичный материал к ране. Накройте марлевой подушечкой. Зафиксируйте эластичным бинтом.
- 3) Загерметизируйте края с помощью скотча.

НБИ Гемостатический колпачок можно отделить от марлевой подушечки использовать в качестве гемостатика.