

Paski Pharmastrip 3 x 75mm



Cena: 4,32 zł

Opis słownikowy

Dostępność	chwilowo niedostępny
Producent	Pharmaplast

Opis produktu

Paski do zamykania ran Pharmastrip 3 x 75mm

Sterylnie paski do zamykania ran w rozmiarze 3mm x 75mm - opakowanie 5 szt.
Przeznaczone do bezurazowego zamykania ran.
Wskazane do zaopatrywania ran urazowych i pooperacyjnych.

- zamykają rany cięte
- ograniczają (w niektórych przypadkach) konieczność szycia rany
- sterylne

Paski do zamykania ran Pharmastrip nadają się do zamykania niewielkich ran.
Mogą być stosowane samodzielnie (jako pierwotne zamknięcie rany) oraz w połączeniu ze szwami chirurgicznymi lub staplerami.
Paski Pharmastrip polepszają warunki gojenia rany, zmniejszają ryzyko wystąpienia infekcji, zwiększają komfort pacjenta i obniżają koszty leczenia.

Jak stosować?

- Przed zastosowaniem pasków skóra powinna być czysta, sucha i odtłuszczona.
- Nie należy stosować pasków pod naprężeniem.
- Skórę należy oczyścić w promieniu przynajmniej 5 cm od brzegów rany.
- Otworzyć opakowanie przez odciągnięcie wolnych brzegów, zagiąć brzeg wewnętrznego opakowania wzdłuż perforowanego brzegu i oderwać krawędź. Wyjmować paski pod kątem 45 stopni do opakowania.
- Zbliżyć do siebie oba brzegi rany używając palców lub pensety.
- Zamocować pierwszy pasek pośrodku rany, najpierw po jednej stronie, a następnie po drugiej. W czasie przyklejania nie stosować naprężenia.

- Przy większych ranach podzielić rany na sektory. Redukuje to napężenie pasków i ułatwia zbliżenie brzegów rany. Jeśli skóra jest wilgotna, należy najpierw ją osuszyć.
- Paski powinny być rozmieszczone w niewielkich odstępach od siebie (ok. 3 mm), aby umożliwić odpowiedni drenaż.
- Jeśli brzegi rany zachodzą na siebie pod pierwszym lub paru pierwszych paskach należy je usunąć i zastąpić nowymi.
- Zamocować dodatkowe paski równolegle do brzegów rany (ok. 1,25 cm od cięcia) tworząc układ przypominający drabinę w celu bardziej równomiernego rozkładu naprężeń.

Galeria

