

Paski Steri-Strip 12 x 100mm

Cena: 6,70 PLN



Opis słownikowy

Dostępność	dostępny
Producent	3M

Opis produktu

Paski do zamykania ran Steri-Strip 12 x 100mm

Sterylny pasek do zamykania ran w rozmiarze 12mm x 100mm - opakowanie 6 szt.
Przeznaczone do bezurazowego zamykania ran.
Wskazane do zaopatrywania ran urazowych i pooperacyjnych.

- zamykają rany cięte
- Ograniczają (w niektórych przypadkach) konieczność szycia rany
- sterylne

Paski do zamykania ran Steri-Strip nadają się do zamykania niewielkich ran. Mogą być stosowane samodzielnie (jako pierwotne zamknięcie rany) oraz w połączeniu ze szwami chirurgicznymi lub staplerami. Paski Steri-Strip polepszają warunki gojenia rany, zmniejszają ryzyko wystąpienia infekcji, zwiększają komfort pacjenta i obniżają koszty leczenia.

Jak stosować?

Przed zastosowaniem pasków skóra powinna być czysta, sucha i odtłuszczona.

Nie należy stosować pasków pod naprężeniem.

Skórę należy oczyścić w promieniu przynajmniej 5 cm od brzegów rany.

Otworzyć opakowanie przez odciągnięcie wolnych brzegów, zagiąć brzeg wewnętrznego opakowania wzdłuż perforowanego brzegu i oderwać krawędź. Wyjmować paski pod kątem 45 stopni do opakowania.

Zbliżyć do siebie oba brzozy rany używając palców lub pensety.

Zamocować pierwszy pasek pośrodku rany, najpierw po jednej stronie, a następnie po drugiej. W czasie przyklejania nie stosować naprężenia.

Przy większych ranach podzielić rany na sektory. Redukuje to naprężenie pasków i ułatwia zbliżenie brzegów rany. Jeśli skóra jest

wilgotna, należy najpierw ją osuszyć.

Paski powinny być rozmieszczone w niewielkich odstępach od siebie (ok. 3 mm), aby umożliwić odpowiedni drenaż.

Jeśli brzegi rany zachodzą na siebie pod pierwszym lub paru pierwszych paskach należy je usunąć i zastąpić nowymi.

Zamocować dodatkowe paski równolegle do brzegów rany (ok. 1,25 cm od cięcia) tworząc układ przypominający drabinę w celu bardziej równomiernego rozkładu naprężeń.