

Przyrząd do usuwania jadu owadów i kleszczy



Cena: 18,00 zł

Opis słownikowy

Dostępność

chwilowo niedostępny

Opis produktu

Przyrząd do usuwania jadu owadów i kleszczy

Przyrząd do usuwania kleszczy: Anty-Kleszcz

Przyrząd działa na zasadzie pompki ssącej – po szczelnym przyłożeniu końcówki wokół miejsca ukąszenia i stopniowym odciąganiu tłoka, w końcówce wytwarza się podciśnienie, które umożliwia „wysanie” kleszcza z ciała ofiary.

Można go stosować do odsysania (aspiracji) jadu po ukąszeniu owadów (komarów, os, pszczoł, szerszeni itp.), żmij, skorpionów.

Przyrząd służy również do usuwania kleszczy z ciała człowieka.

Powstała w końcówce pompki próżnia powoduje wysysanie kleszcza z ciała i nie pozostawia żadnych części pasożyta w ciele człowieka.

Doskonale służy przy udzielaniu pierwszej pomocy. W przypadkach bardziej skomplikowanych należy niezwłocznie udać się do lekarza.

Dzięki zastosowaniu bardzo szczelnej, gumowej uszczelki, skuteczność działania pompki jest zagwarantowana na bardzo długi czas.

Sposób użycia:

Zastosować możliwie jak najszybciej po ukąszeniu lub zauważeniu na ciele kleszcza.

1. Aby przygotować przyrząd do użycia należy wcisnąć gumowy tłok do oporu.
2. Przyłożyć końcówkę przyrządu do ciała w miejsce wprowadzenia jadu (lub wczepienia się kleszcza). Miejsce ukąszenia powinno znajdować się w centralnej części położenia końcówki.
4. Docisnąć przyrząd do ciała i tak utrzymując docisk stopniowo, powoli odciągać tłok do odpowiedniej pozycji.
5. Przytrzymać przyrząd w tej pozycji około 10-15 sekund, w razie potrzeby powtórzyć zabieg.
6. Zdezynfekować miejsce ukąszenia środkami odkażającymi. Końcówkę przyrządu przemywać wodą z mydłem, zdezynfekować środkiem odkażającym.

Galeria

ANTY-KLESZCZ MOŻE URATOWAĆ TWOJE ZDROWIE A NAWET ŻYCIE

NIE LEKCEWAŻ ZAGROŻENIA!!!

